



Notice d'installation du harnais de maintien avec boucles « verrouillables »



Cette notice est composée de deux parties :

- La première vous présente les manipulations à effectuer pour installer le harnais dans une voiture équipée d'une banquette, disposant d'un espace entre l'assise et le dossier pour laisser passer les sangles principales ;
- La deuxième partie concerne la mise en place du harnais sur un siège individuel, généralement utilisé dans les minibus destinés au transport de personnes.

Le harnais verrouillable est composé de cinq parties principales (six si vous avez choisi l'option pour siège de minibus), que nous appellerons ainsi :

LE PLASTRON



LE SUPPORT DU HARNAIS OU LA BANDE DE TISSU



LA SANGLE POUR L'ENTREJAMBE



LES JEUX DE CLES



LE COUPE CEINTURE D'URGENCE



LA SANGLE POUR SIEGE INDIVIDUEL OU SANGLE DE MAINTIEN




Installation sur une banquette de voiture

Voici les étapes à suivre pour mettre en place le harnais :

1) Pour commencer, détachez le plastron du reste du harnais pour ne pas être gêné dans la suite des manipulations. Retirez également l'appui-tête du siège de la voiture.



2) Prenez le support du harnais par la partie basse pour avoir les deux boucles (avec bouton rouge) dans les mains. Sur la bande de tissu, vous pouvez voir d'un côté le système d'attache des sangles qui servent à fixer le plastron. Ce côté sera contre la banquette, non visible une fois installé.

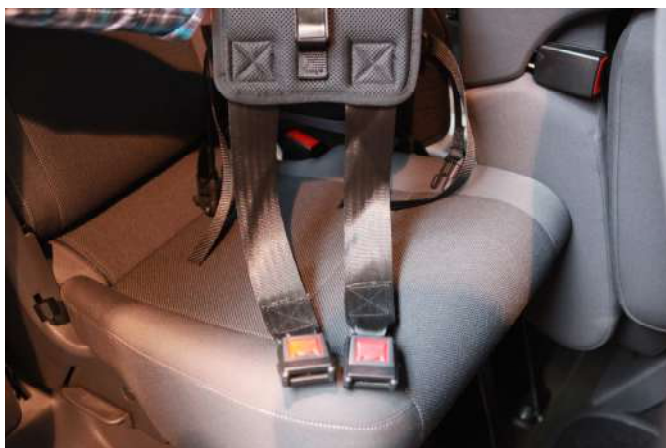

3) Glissez les deux boucles entre l'assise et le dossier de la banquette.


Si l'espace est trop juste pour y passer directement les sangles, vous pouvez rabattre légèrement le dossier de la banquette, l'écart entre les 2 parties de la banquette sera ainsi plus large pour passer plus facilement les boucles.




4) Plaquez la bande de tissu contre le dossier pour faire passer la partie haute par-dessus du dossier de la banquette (entre les 2 tiges de l'appui-tête) et rejoignez les boucles. Réglez la longueur des sangles. Pour une banquette du dossier de la longueur des sangles sera trop importante, c'est normal.



A noter que si la hauteur du dossier de la banquette est trop juste pour obtenir des sangles tendues, vous pouvez remettre l'appui-tête et faire passer la bande de tissu par-dessus l'appui-tête pour gagner en hauteur. Cette méthode d'installation doit également être privilégiée si le passager est grand.

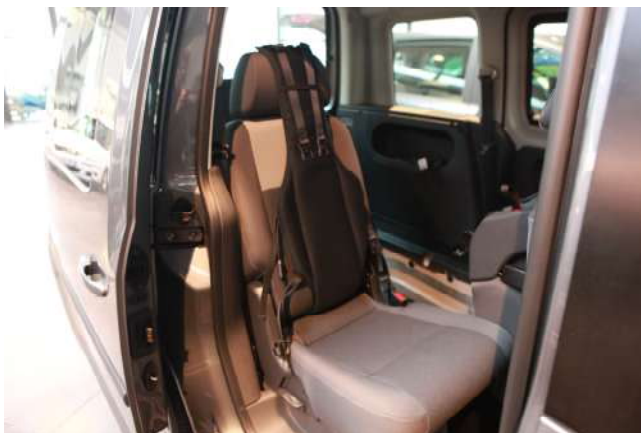

5) Si ce n'est pas déjà fait, remplacez l'appui-tête de la banquette.

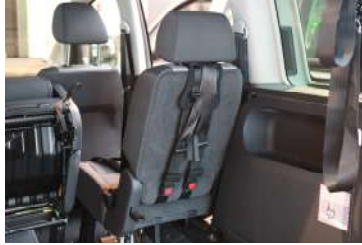

Prenez la petite sangle d'entrejambe et glissez-la entre l'assise et le dossier au centre du harnais. Une fois derrière, glissez la sangle dans le clapet noir de manière à la fixer. La position de cette sangle sera à ajuster lors de l'installation du passager.



L'installation du harnais est terminée, les étapes suivantes concernent l'utilisation du harnais lors du transport d'un passager ayant une faiblesse du tronc et/ou tendance à se détacher en route.


- 6) Une fois le passager assis, attachez toutes les boucles du plastron et verrouillez-les à l'aide de la clé uniquement si nécessaire.



- 7) Réglez la longueur des sept sangles fixées sur le plastron, notamment celle de l'entrejambe (cette étape est à réaliser une seule fois si vous transportez toujours le même passager).



8) Pour gagner du temps lors des futures installations, laissez les trois sangles du côté opposé attachées sur le plastron (1 en haut et 2 sur le côté, en position verrouillée si nécessaire pour le passager).

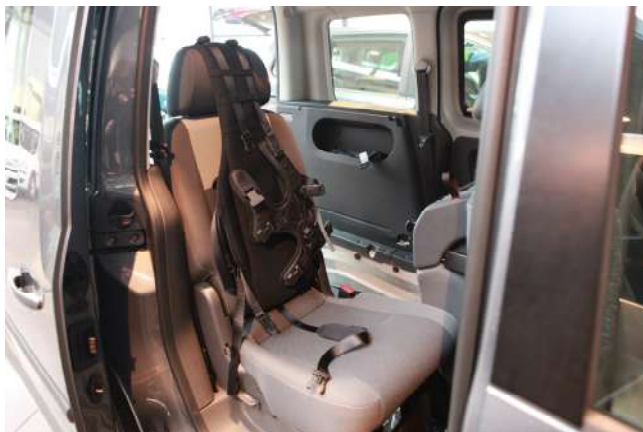

9) Boucler la ceinture de sécurité du passager (**étape obligatoire**, le harnais ne doit pas être utilisé sans la ceinture de sécurité).



Installation sur un siège individuel de minibus

Comme indiqué sur la fiche produit du harnais, pour la mise en place de ce dernier sur un siège individuel, il est recommandé d'utiliser la petite sangle supplémentaire, disponible en option.

1) Positionnez le support du harnais sur le siège souhaité. La partie possédant les deux boucles à bouton rouge est à mettre vers le bas. Les longues sangles passent derrière le siège, puis en dessous pour venir rejoindre les deux boucles et les attacher ensemble. La longueur des sangles sera utilisée dans sa totalité ou presque, n'hésitez pas à agrandir les sangles lors de la première installation.

Ne réglez pas tout de suite les grandes sangles !



2) Pour maintenir le support plaqué contre le siège, utilisez la petite sangle pour siège individuel pour faire le tour du siège, au niveau de la jonction entre le dossier et l'assise.



3) La sangle pour l'entrejambe vient se fixer dans le petit clapet noir situé sur le support, partie basse. Elle doit ensuite passer sous la sangle de maintien du harnais (installée à l'étape précédente) puis revenir vers l'avant pour la fixer dans le clip noir.





L'installation du support est terminée, il ne reste plus qu'à effectuer les derniers réglages au niveau du plastron avec le passager.

4) Une fois le passager assis, attachez toutes les boucles du plastron, verrouillez-les à l'aide de la clé uniquement si nécessaire.



5) Réglez la longueur des sept sangles fixées sur le plastron, notamment celle de l'entrejambe (cette étape est à réaliser une seule fois si vous transportez toujours le même passager).



6) Pour gagner du temps lors des futures installations, laissez les 3 sangles du côté opposé attachées sur le plastron (1 en haut et 2 sur le côté, en position verrouillée si nécessaire pour le passager).



7) Boucler la ceinture de sécurité du passager (**étape obligatoire**, le harnais ne doit pas être utilisé sans la ceinture de sécurité).



Quelques recommandations complémentaires :

- Utilisez le verrouillage des boucles uniquement face à un passager turbulent, dangereux pour lui et pour les autres.
- Ne laissez pas toutes les clés ensemble de manière à toujours en avoir une à portée de main.
- Conservez le coupe ceinture d'urgence à bord du véhicule pour pouvoir agir rapidement en cas de problème (dans la boîte à gants par exemple).
- Ne laissez pas le coupe ceinture à la portée des enfants. Vérifiez régulièrement l'état du système de verrouillage des sept boucles.
- Ces 3 sangles (photo ci-dessous) servent à régler les 2 sangles qui passent sur les épaules. Il est possible de choisir de faire passer les sangles derrière une ou plusieurs ligne(s) selon la taille du passager. Il est bien sûr possible de ne pas faire passer les sangles du tout derrière ces traits, si le passager est très grand.



[illegible]



Handynamic

1 rue Jean-Baptiste Mullier
Hameau de Martinsart
F-59113 Seclin

Tél : 03.28.168.167
Fax : 03.28.555.112

E-mail : boutique@handynamic.fr
Site véhicules accessibles : www.handynamic.fr
Boutique : boutique.handynamic.fr