

Notice d'utilisation

Support de parapluie universel pour fauteuil roulant



 **handynamic**
La boutique


I. Présentation

Le support de parapluie pour fauteuil roulant se fixe sur une partie rigide à l'arrière ou à l'avant du fauteuil roulant. Il s'adapte aux diamètres de parapluie supérieurs à 29 mm.

Fonctionnement


Vous disposez de **3 parties** nécessaires à la fixation du support de parapluie : (1)

- a. bague de fixation du support sur le fauteuil roulant
- b. tige de jonction des deux bagues de serrage
- c. bague de fixation du parapluie (plus petite)

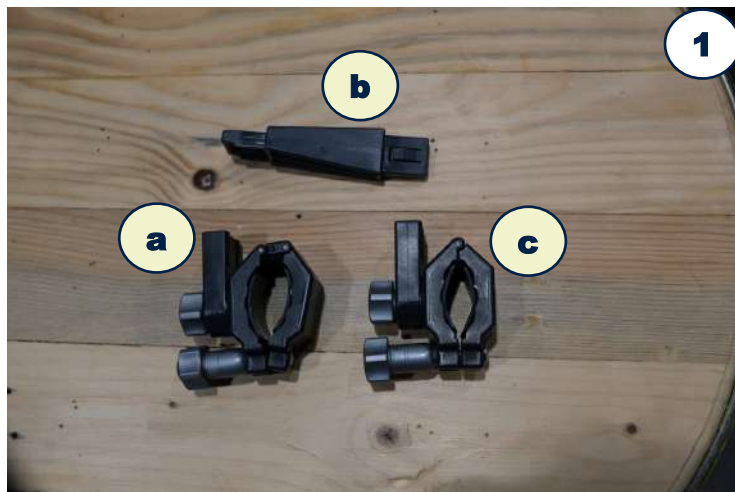

II. Montage du support

- a. Insérer la tige de jonction (page 2 photo 1-b) dans la bague de fixation du fauteuil roulant (page 2 photo 1-a), plus grande, en la poussant jusqu'au bout. (1) Veiller à placer la languette côté apparent du rond ouvert. (2)
- b. Insérer ensuite la bague de fixation du parapluie (page 2 photo 1-c), plus petite, sur l'autre extrémité de la tige de jonction. (3)

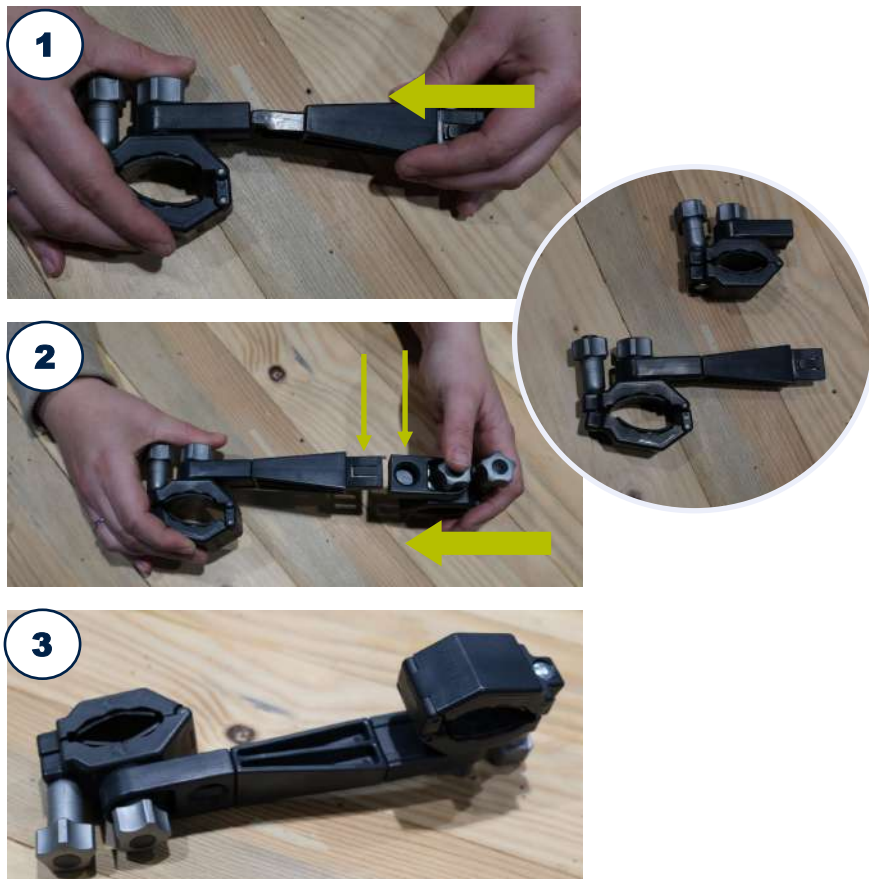

III. Fixation sur le fauteuil roulant

- a. Ouvrir la bague de fixation pour le fauteuil roulant, la plus large, en utilisant la molette de serrage du bas. Ne pas hésiter à dévisser **au maximum** afin d'obtenir l'ouverture souhaitée, jusqu'à 3 cm. (1)
- b. La positionner sur la **partie rigide** du fauteuil roulant. (2)
- c. Refermer la bague de fixation en vissant la molette de serrage au maximum jusqu'à ce que la fixation ne bouge plus.



IV. Orientation du support

Le support pour le fauteuil roulant s'oriente de vertical à horizontal en utilisant la molette de serrage supérieure. (1)

Une fois la position souhaitée obtenue, revisser au maximum.



V. Fixation du parapluie

- a. Ouvrir la bague de fixation à l'aide de la molette de serrage située sur la bague de fixation. (1)
- b. Insérer le manche du parapluie dans la bague de fixation. (2)
- c. Utiliser la molette de serrage pour refermer en vissant au maximum. (3)




VI. Orientation du parapluie

La bague de serrage du parapluie s'oriente en utilisant la molette de serrage située sur le support. (1)

Une fois la position souhaitée obtenue, revisser au maximum.



Le parapluie peut être pris en main. Appuyer sur le bouton et sortir la tige de jonction de la bague de fixation du fauteuil roulant. (2)

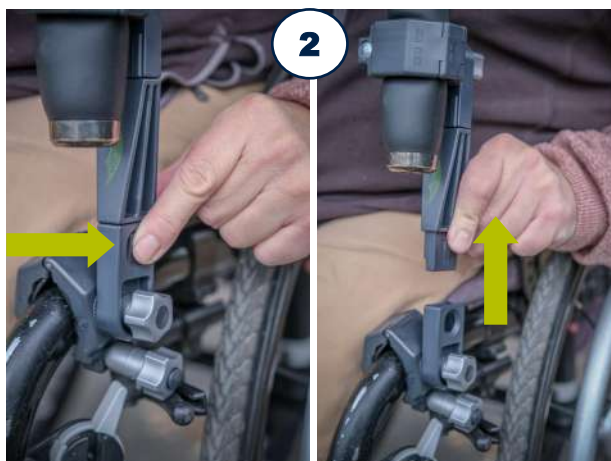



Le site : **www.boutique.handynamic.fr**

Ed. 12/24

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits :



03 28 168 167



boutique@handynamic.fr



Nous rendre visite :

Pour les habitants des Hauts-de-France, n'hésitez pas à venir découvrir nos produits dans nos locaux :



**1 rue Jean-Baptiste Mulier
Hameau de Martinsart
59113 SECLIN**